


SOLUTIONS PROTHÉTIQUES VITA

Cartes de formes

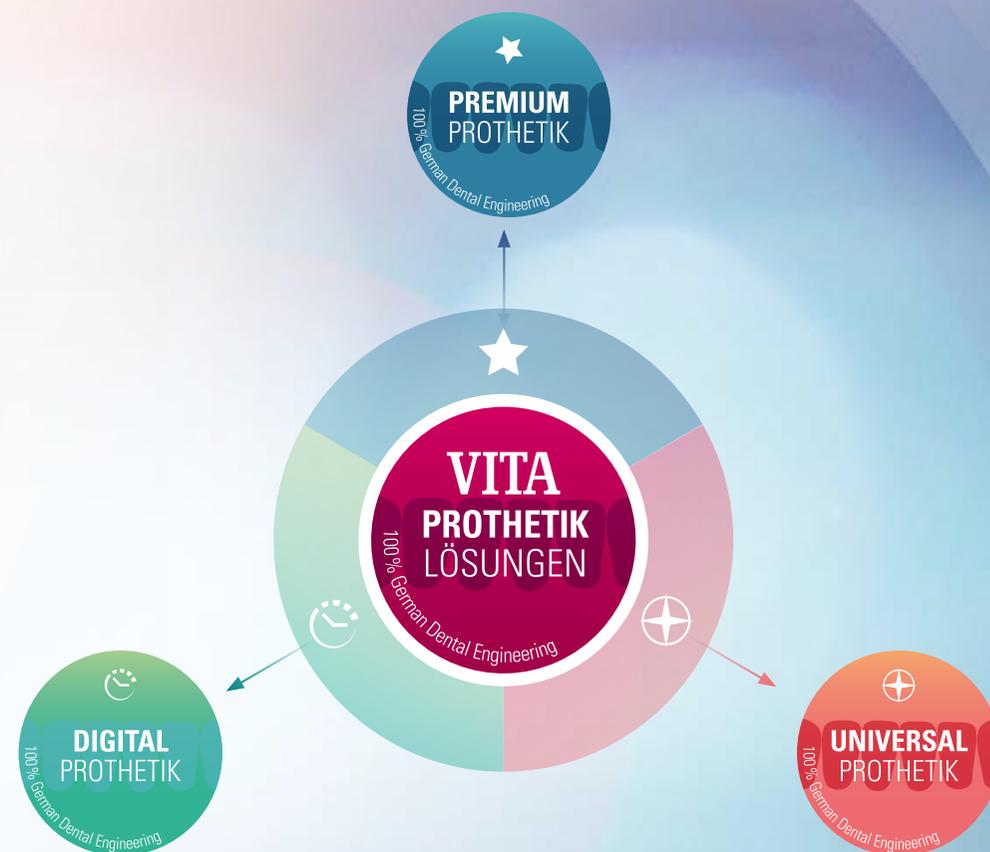

Pour les meilleures prothèses dentaires : naturelles, fiables, diversifiées.

C'est aussi simple que cela – la forme de dents adaptée en trois étapes !

1.

Choisissez la catégorie / gamme de dents

Sélectionnez une catégorie / gamme de dents en fonction des exigences posées par le cas ou indication.

2.

Choisissez le groupe de formes

Choisissez le groupe de formes correspondant à la forme de visage / mâchoire du patient.

3.

Déterminez la forme de dent adaptée

Déterminez la forme de dent adaptée sur la base du tracé des pointes canines et de la ligne du sourire.



1. Choisissez la catégorie / gamme de dents adaptée

Un jeu de couleurs et de formes vivant pour des résultats naturels.




La meilleure diversité de formes et de couleurs pour tous les cas.



Prothèses CFAO efficaces pour une plus grande productivité.



> Combinaisons antérieures / postérieures recommandées

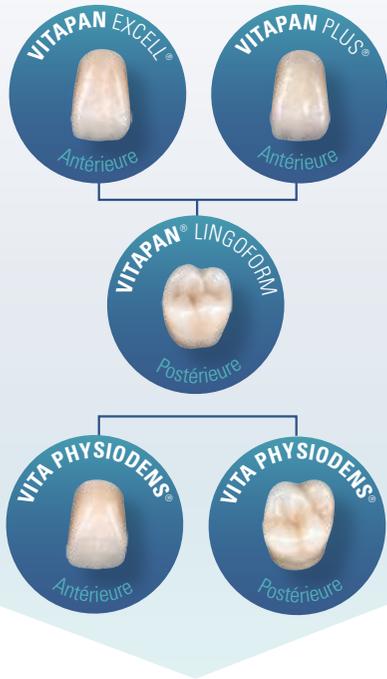


> Indication(s) conseillée(s)*

	★			⊕			😊
Antérieure	VITAPAN EXCELL	VITAPAN PLUS	VITA PHYSIODENS	VITAPAN			VITA VIONIC FRAME
Postérieure	VITAPAN LINGOFORM		VITA PHYSIODENS	VITAPAN CUSPIFORM	VITAPAN SYNOFORM		
Prothèse totale	●	●		●			●
Prothèse partielle	●	●	●	●			
Prothèse combinée			●				
Prothèse implanto-portée	●	●					
Prothèse gérontologique						●	


* Il s'agit ici d'indications conseillées pour les différentes solutions prothétiques / dents artificielles, toutefois l'ensemble des prothèses totales, partielles, combinées et implanto-portées est généralement possible !

2. Choisissez le groupe de formes adapté

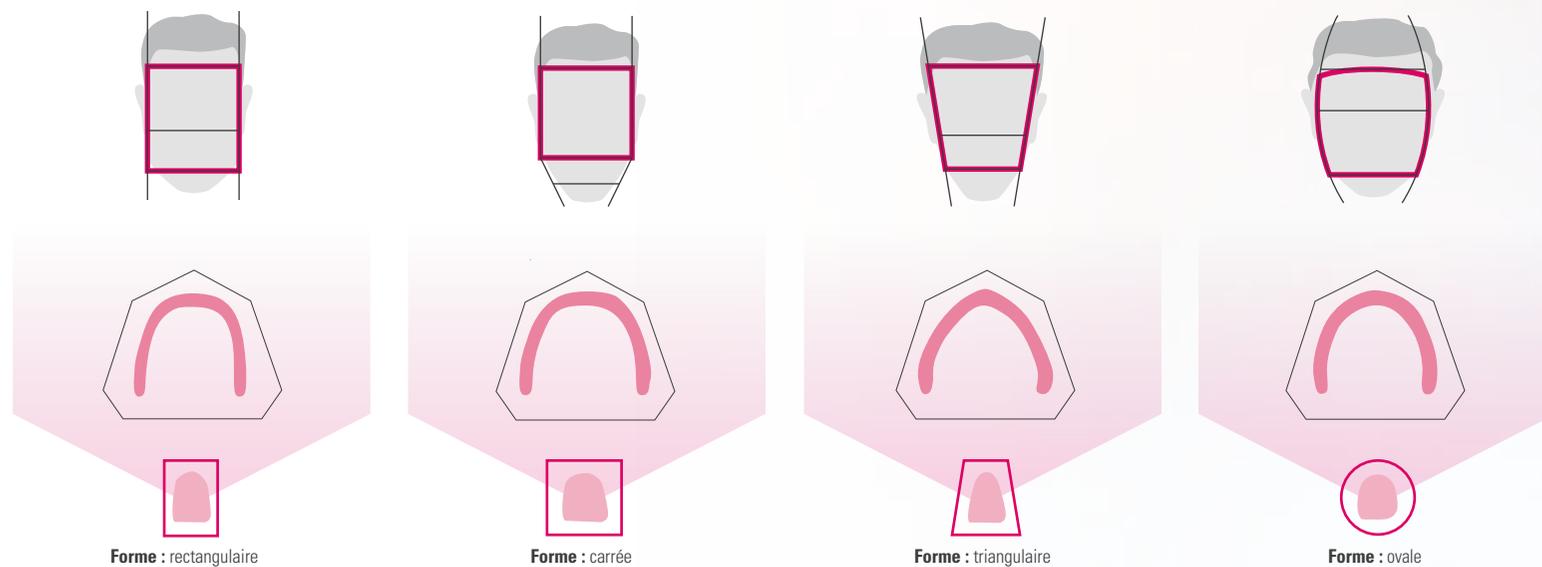


3. Déterminez la forme de dent adaptée

La largeur et la longueur nécessaires des dents antérieures sont déterminées par le tracé des pointes canines et de la ligne du sourire.

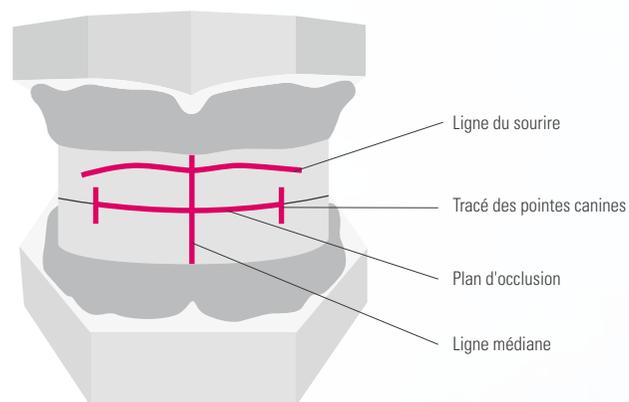

Ligne du sourire

Elle est capitale pour la longueur des dents antérieures maxillaires, le collet des dents doit se trouver au-dessus de cette ligne.

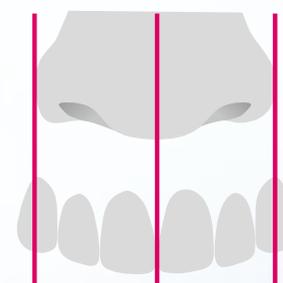

Tracé des pointes canines

Ce tracé est déterminant pour la largeur du bloc antérieur maxillaire. Les pointes canines maxillaires doivent se trouver à cet endroit.



VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA VIONIC
FRAME

Antérieure maxillaire



ovale



triangulaire



rectangulaire





S46



Antérieure mandibulaire

L33



L35



L37



L39



L41



► Remarque : pour les formes VITAPAN LINGOFORM, veuillez sélectionner le registre adapté

VITAPAN EXCELL Antérieure	Max. / N°	041	043	045	047	049	051	T42	T44	T46	T47	T48	T50	T54	R45	R47	R49	S46
	mm	41,3	43,1	45,1	47,3	49,1	51,4	42,0	44,1	46,2	46,9	48,1	50,0	54,4	45,4	47,0	49,1	46,3
VITAPAN LINGOFORM Postérieure	Man. / N°	L33	L33	L35	L37	L39	L41	L33	L33	L35	L37	L37	L39	L41	L35	L37	L39	L35
	mm	33,2	33,2	35,3	37,3	39,0	41,2	33,2	33,2	35,3	37,3	37,3	39,0	41,2	35,3	37,3	39,0	35,3
VITAPAN LINGOFORM Postérieure	Max. / N°	21L	21L	22L	22L	23L	24L	21L	21L	22L	22L	22L	24L	24L	22L	22L	23L	22L
	mm	30,1	30,1	31,6	31,6	34,2	35,8	30,1	30,1	31,6	31,6	31,6	35,8	35,8	31,6	31,6	34,2	31,6
VITAPAN LINGOFORM Postérieure	Man. / N°	21L	21L	22L	22L	23L	24L	21L	21L	22L	22L	22L	24L	24L	22L	22L	23L	22L
	mm	30,7	30,7	32,1	32,1	34,8	36,4	30,7	30,7	32,1	32,1	32,1	36,4	36,4	32,1	32,1	34,8	32,1

Les données fournies dans le tableau de correspondance n'ont qu'une valeur indicative car elles varient d'un patient à l'autre.

VITAPAN PLUS®

Disponibles en 28 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER® (0M1, 0M3, 1M1 – 5M3) et 15 couleurs VITA classical A1 – D4® (sans B1)

Antérieure maxillaire

 ovale	041 41,3 7,4 9,1	043 43,1 7,9 9,1	045 45,1 8,4 9,7	047 47,3 8,6 10,3
	047L (047 avec collet plus long) 47,3 8,6 10,3	049 49,1 9,0 10,9	051 51,4 9,3 12,3	
 triangulaire	T42 42,0 7,7 9,5	T44 44,1 8,1 9,9	T46 46,2 8,2 10,4	T47 46,9 8,5 10,9
	T48 48,1 8,8 11,3	T50 50,0 9,2 11,6	T54 54,4 9,8 12,7	
 rectangulaire	R45 45,4 8,2 9,9	R47 47,0 8,6 11,2	R49 49,1 8,9 11,7	



S46



Antérieure mandibulaire


L33



L35



L37

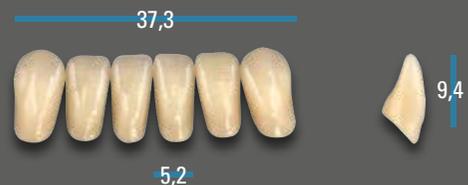

L37L* (L37 avec collet plus long)



L39



L41



VITAPAN PLUS Antérieure	Max. / N° mm	041 41,3	043 43,1	045 45,1	047 47,3	047L* 47,3	049 49,1	051 51,4	T42 42,0	T44 44,1	T46 46,2	T47 46,9	T48 48,1	T50 50,0	T54 54,4	R45 45,4	R47 47,0	R49 49,1	S46 46,3
	Man. / N° mm	L33 33,2	L33 33,2	L35 35,3	L37 37,3	L37L* 37,3	L39 39,0	L41 41,2	L33 33,2	L33 33,2	L35 35,3	L37 37,3	L37 37,3	L39 39,0	L41 41,2	L35 35,3	L37 37,3	L39 39,0	L35 35,3
VITAPAN LINGOFORM Postérieure	Max. / N° mm	21L 30,1	21L 30,1	22L 31,6	22L 31,6	22L 31,6	23L 34,2	24L 35,8	21L 30,1	21L 30,1	22L 31,6	22L 31,6	22L 31,6	24L 35,8	24L 35,8	22L 31,6	22L 31,6	23L 34,2	22L 31,6
	Man. / N° mm	21L 30,7	21L 30,7	22L 32,1	22L 32,1	22L 32,1	23L 34,8	24L 36,4	21L 30,7	21L 30,7	22L 32,1	22L 32,1	22L 32,1	24L 36,4	24L 36,4	22L 32,1	22L 31,6	23L 34,8	22L 32,1

Les données fournies dans le tableau de correspondance n'ont qu'une valeur indicative car elles varient d'un patient à l'autre. * Longue (047 et L37 avec collet plus long)

VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA VIONIC
FRAME

VITAPAN® LINGOFORM

Disponibles en 27 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER® (0M3, 1M1 – 5M3) et 15 couleurs VITA classical A1 – D4® (sans B1)

Postérieure



*) Couleur blanche 0M3 disponible exclusivement pour la (les) forme(s) choisie(s).

VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA VIONIC
FRAME

VITA PHYSIODENS®

Disponibles en 28 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER® (0M1, 0M3, 1M1 – 5M3) et 15 couleurs VITA classical A1 – D4® (sans B1)

Antérieure maxillaire



ovale

01S* 42,3 7,6 10,8	02L 45,7 8,4 11,5	03M 47,2 8,6 10,8	04L 49,2 9,0 12,7
05L 50,1 9,1 11,4	06L 51,3 9,7 13,1		
T6S** 41,0 7,4 10,4	T2S* 44,9 8,3 10,1	T1S 45,3 8,7 10,2	T3M 45,6 8,4 11,7
T4M* 45,6 8,8 11,3	T5M 46,2 8,8 11,1	T6L 47,3 8,9 12,4	T7M 47,5 8,8 11,6
T8L* 49,0 9,2 11,6	T9L 49,6 9,4 13,1		



triangulaire



rectangulaire

X1M* 46,3



8,8

11,0

X2L 46,2



8,7

11,6

X3L 47,8



9,0

11,8



carrée

Z1S 44,1



8,1

9,8

Z2S 47,5



8,7

10,1

Antérieure mandibulaire

L1S* 33,0

8,8

4,9

L2M* 34,5

10,4

5,2

L3M* 36,3

10,5

5,2

L4M* 35,5

9,4

5,4

L5M* 37,0

10,4

5,5

L6L 38,2

11,4

5,8

L7L 38,2

10,4

5,5

L8L 43,5

13,0

6,3

*) Couleur(s) blanchies 0M1 et 0M3 disponible(s) exclusivement pour la ou les formes choisies.
 **) Forme(s) uniquement disponible(s) dans la ou les couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER.

VITA PHYSIODENS®

VITA PHYSIODENS Antérieure	Max. / N°  mm	01S 42,3	02L 45,7	03M 47,2	04L 49,2	05L 50,1	06L 51,3	T6S 41,0	T2S 44,9	T1S 45,3	T3M 45,6	T4M 45,6	T5M 46,2	T6L 47,3	T7M 47,5	T8L 49,0	T9L 49,6
	Man. / N°  mm	L1S 33,0	L2M 34,5	L3M 36,3	L6L 38,2	L6L 38,2	L8L 43,5	L1S 33,0	L2M 34,5	L1S 33,0	L3M 36,3	L4M 35,5	L3M 36,3	L5M 37,0	L7L 38,2	L5M 37,0	L6L 38,2
VITA PHYSIODENS Postérieure	Max. / N°  mm	21E 30,5	22E 32,9	23E 33,5	24E 34,8	24E 34,8	25E 36,7	21E 30,5	21E 30,5	20E 29,4	22E 32,9	22E 32,9	23E 33,5	23E 33,5	23E 33,5	24E 34,8	25E 36,7
	Man. / N°  mm	21E 32,7	22E 33,7	23E 34,6	24E 36,1	24E 36,1	25E 37,3	21E 32,7	21E 32,7	20E 31,0	22E 33,7	22E 33,7	23E 34,6	23E 34,6	23E 34,6	24E 36,1	25E 37,3

VITA PHYSIODENS Antérieure	Max. / N°  mm	X1M 46,3	X2L 46,2	X3L 47,8	Z1S 44,1	Z2S 47,5
	Man. / N°  mm	L3M 36,3	L4M 35,5	L5M 37,0	L1S 33,0	L5M 37,0
VITA PHYSIODENS Postérieure	Max. / N°  mm	23E 33,5	23E 33,5	24E 34,8	21E 30,5	22E 32,9
	Man. / N°  mm	23E 34,6	23E 34,6	24E 36,1	21E 32,7	22E 33,7

Les données fournies dans le tableau de correspondance n'ont qu'une valeur indicative car elles varient d'un patient à l'autre.

VITA PHYSIODENS®

Disponibles en 27 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER® (0M3, 1M1 – 5M3) et 15 couleurs VITA classical A1 – D4® (sans B1)

Postérieure



*) Couleur blanchie 0M3 disponible exclusivement pour la ou les formes choisies.

Antérieure maxillaire



T98



T99



X13



X66



X77



X87



rectangulaire

X96



X99



Z51



Z61



Z74



Z84



carrée

Z85



Z97



VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA VIONIC
FRAME

Antérieure mandibulaire

Bords incisifs entièrement formés

Bords incisifs entièrement formés	<p>L3</p> <p>33,4</p>  <p>5,0</p>	<p>L5*</p> <p>9,2</p>  <p>5,2</p>	<p>L5L</p> <p>34,2</p>  <p>9,9</p> <p>5,1</p>	<p>L7*</p> <p>36,2</p>  <p>8,7</p> <p>5,4</p>
	<p>L9</p> <p>36,1</p>  <p>9,0</p> <p>5,6</p>	<p>L11*</p> <p>36,9</p>  <p>9,1</p> <p>5,7</p>	<p>L13</p> <p>37,0</p>  <p>8,7</p> <p>5,6</p>	<p>L15</p> <p>38,0</p>  <p>12,2</p> <p>5,7</p>
Bords incisifs abrasés	<p>L4*</p> <p>32,7</p>  <p>8,3</p> <p>4,7</p>	<p>L8</p> <p>38,9</p>  <p>9,8</p> <p>5,8</p>	<p>L10</p> <p>39,0</p>  <p>9,2</p> <p>5,9</p>	<p>L12</p> <p>41,0</p>  <p>9,8</p> <p>6,2</p>
	<p>L14</p> <p>41,7</p>  <p>10,9</p> <p>6,1</p>			

*) Couleur(s) blachie(s) 0M1 et 0M3 disponible(s) exclusivement pour la ou les formes choisies.

VITAPAN Antérieure	Max. / N°  mm	013 41,7	025 42,8	034 43,3	035 43,2	043 43,6	086 47,1	097 49,2	098 48,1	099 52,5	T36 43,7	T53 44,6	T56 44,4	T66 44,6	T67 45,1	T76 45,9	T77 46,2	T88 47,1	T98 50,5	T99 48,0
	Man. / N°  mm	L4 32,7	L3 33,4	L3 33,4	L3 33,4	L5 35,3	L11 36,9	L8 38,9	L13 37,0	L14 41,7		L4 32,7	L5 35,3	L5 35,3	L5 35,3	L4 32,7	L7 36,2	L11 36,9	L11 36,9	L15 38,0
VITAPAN CUSPIFORM Postérieure	Max. / N°  mm	40C 28,1	40C 28,1	41C 29,9	41C 29,9	41C 29,9	42C 31,7	44C 32,8	42C 31,7	45C 34,8	40C 28,1	41C 29,9	41C 29,9	42C 31,7	42C 31,7	42C 31,7	42C 31,7	44C 32,8	45C 34,8	44C 32,8
	Man. / N°  mm	40C 29,5	40C 29,5	41C 31,3	41C 31,3	41C 31,3	42C 33,4	44C 34,6	42C 33,4	45C 36,3		40C 29,5	41C 31,3	41C 31,3	42C 33,4	42C 33,4	42C 33,4	42C 33,4	44C 34,6	45C 36,3
VITAPAN SYNOFORM Postérieure	Max. / N°  mm	10S 29,0	10S 29,0	11S 30,0	11S 30,0	11S 30,0	12S 31,3	14S 33,1	12S 31,3	14S 33,1	10S 29,0	11S 30,0	11S 30,0	12S 31,3	12S 31,3	12S 31,3	12S 31,3	14S 33,1	14S 33,1	14S 33,1
	Man. / N°  mm	10S 30,5	10S 30,5	11S 31,9	11S 31,9	11S 31,9	12S 32,7	14S 35,4	12S 32,7	14S 35,4		10S 30,5	11S 31,9	11S 31,9	12S 32,7	12S 32,7	12S 32,7	12S 32,7	14S 35,4	14S 35,4

VITAPAN Antérieure	Max. / N°  mm	X13 41,5	X66 45,9	X77 47,0	X87 46,9	X96 50,0	X99 50,6	Z51 44,6	Z61 45,5	Z74 46,7	Z84 46,7	Z85 47,5	Z97 52,2
	Man. / N°  mm	L4 32,7	L9 36,1	L11 36,9	L11 36,9	L10 39,0	L15 38,0	L3 33,4	L3 33,4	L9 36,1	L9 36,1	L13 37,0	L12 41,0
VITAPAN CUSPIFORM Postérieure	Max. / N°  mm	41C 29,9	42C 31,7	42C 31,7	44C 32,8	44C 32,8	45C 34,8	43C 31,0	43C 31,0	42C 31,7	42C 31,7	44C 32,8	45C 34,8
	Man. / N°  mm	41C 31,3	42C 33,4	42C 33,4	44C 34,6	44C 34,6	45C 36,3	43C 32,3	43C 32,3	42C 33,4	42C 33,4	44C 34,6	45C 36,3
VITAPAN SYNOFORM Postérieure	Max. / N°  mm	11S 30,0	12S 31,3	12S 31,3	14S 33,1	14S 33,1	14S 33,1	13S 31,3	13S 31,3	12S 31,3	12S 31,3	14S 33,1	14S 33,1
	Man. / N°  mm	11S 31,9	12S 32,7	12S 32,7	14S 35,4	14S 35,4	14S 35,4	13S 33,9	13S 33,9	12S 32,7	12S 32,7	14S 35,4	14S 35,4

Les données fournies dans le tableau de correspondance n'ont qu'une valeur indicative car elles varient d'un patient à l'autre.

VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM


VITAPAN
SYNOFORM

VITA VIONIC
FRAME

VITAPAN® CUSPIFORM

Disponibles en 27 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER® (0M3, 1M1 – 5M3) et 15 couleurs VITA classical A1 – D4® (sans B1)

Postérieure

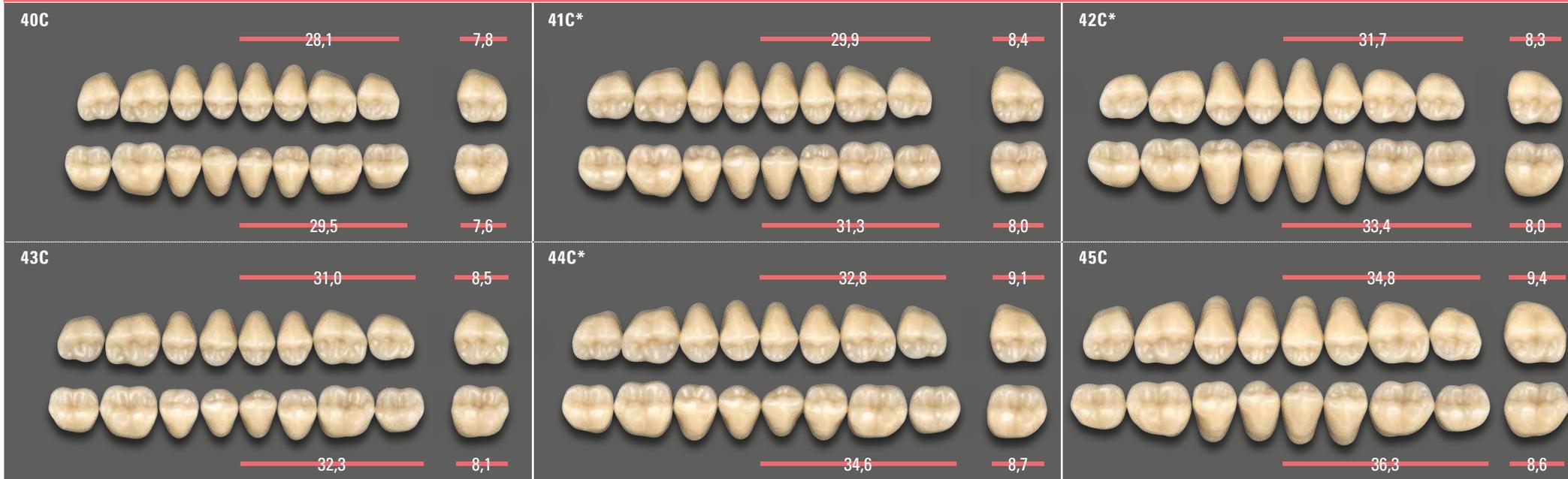

*) Couleur blanche 0M3 disponible exclusivement pour la ou les formes choisies.

VITAPAN SYNOFORM®

Disponibles en 15 couleurs VITA classical A1 – D4® (sans B1)

Postérieure

10S <p>29,0 7,5 30,5 6,8</p>	11S <p>30,0 7,8 31,9 7,3</p>	12S <p>31,1 8,7 32,7 7,8</p>
13S <p>31,3 8,3 33,9 7,4</p>	14S <p>33,1 9,3 35,4 8,3</p>	

VITAPAN EXCELL® DD FRAME

Disponibles en 6 couleurs VITA classical A1–D4® (A1, A2, A3, A3.5, B3, D3)

Antérieure maxillaire



Antérieure mandibulaire



VITAPAN® LINGOFORM DD FRAME


Disponibles en 6 couleurs VITA classical A1–D4® (A1, A2, A3, A3.5, B3, D3)

Postérieure



VITAPAN EXCELL Antérieure	Max. / N°  mm	043 43,1	045 45,1	049 49,1	T44 44,1	T46 46,2	T48 48,1	T50 50,0	R45 45,4	R47 47,0
	Man. / N°  mm	L33 33,2	L35 35,3	L39 39,0	L33 33,2	L35 35,3	L37 37,3	L39 39,0	L35 35,3	L37 37,3
VITAPAN LINGOFORM Postérieure	Max. / N°  mm	21L 30,1	22L 31,6	23L 34,2	21L 30,1	22L 31,6	22L 31,6	24L 35,8	22L 31,6	22L 31,6
	Man. / N°  mm	21L 30,7	22L 32,1	23L 34,8	21L 30,7	22L 32,1	22L 32,1	24L 36,4	22L 32,1	22L 32,1

Vous trouverez de plus amples informations sur les SOLUTIONS **PROTHÉTIQUES VITA** sous :
www.vita-zahnfabrik.com/prosthetics

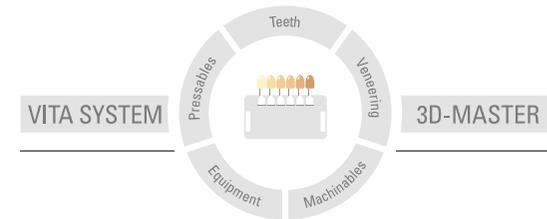

N.B. Nos produits doivent être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Notre responsabilité n'est pas engagée pour les dommages résultant d'une manipulation ou d'une mise en œuvre incorrecte. En outre, l'utilisateur est tenu de vérifier, avant utilisation, que le produit est approprié à l'usage prévu. Notre responsabilité ne peut être engagée si le produit est mis en œuvre avec des matériaux et des appareils d'autres marques, non adaptés ou non autorisés et qu'il en résulte un dommage. Le VITA Modulbox n'est pas un composant obligatoire du produit. Date d'édition : 10.18

Cette nouvelle édition de notice rend caduque toutes les versions antérieures. La version la plus récente se trouve toujours sur le site www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik est certifiée selon la directive sur les dispositifs médicaux et les produits suivants portent le marquage  0124:

Gamme de produits **VITAPAN**, **VITA PHYSIODENS**, gamme de produits **VITA VIONIC**

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline : Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik